

# FFP2

## Facciale filtrante monouso

- Alta efficienza di filtrazione
- Bassa resistenza respiratoria
- Comodo da indossare



### ISTRUZIONI PER L'USO

1

#### **Lavarsi le mani**

Lavare o disinfettare le mani prima dell'uso. Non toccare l'interno della mascherina.

2

#### **Mettere la mascherina**

Indossare la mascherina con il nasello rivolto verso l'alto e regolare il nasello lontano dal naso per adattarlo al viso.

3

#### **Controllare la vestibilità**

Coprire la mascherina con entrambe le mani e respirare dentro e fuori. Non deve uscire aria dalla parte superiore o dai lati della mascherina.

4

#### **Rimuovi**

Rimuovere la mascherina tirando verso il basso i passanti per le orecchie.

# 20 PEZZI

5  
STRATI

### Avvertenze:

- Prodotto monouso, non riutilizzare.
- Sostituire immediatamente la mascherina se danneggiata o bagnata.
- Si raccomanda di non superare il tempo massimo di utilizzo di 8 ore.
- Non lavare, disinfettare o riscaldare la mascherina.
- Le persone allergiche al polipropilene non devono usare questa mascherina.
- Controllare la mascherina prima di entrare nella zona di applicazione.
- Non utilizzare in ambienti con tenori di ossigeno inferiori al 19,5%.
- Le mascherine non proteggono da gas e vapori.
- Cambiare la mascherina se la resistenza alla respirazione aumenta.
- Dopo l'uso, smaltire secondo le disposizioni/raccomandazioni previste dalle legge o dal luogo di lavoro.
- Potete trovare le informazioni sul prodotto e la dichiarazione di conformità UE tramite il codice QR sulla confezione.
- Materiali: Tessuto non tessuto di PPE, filo plastificato, nastro di nylon.